

FEUILLE DE PROGRAMMATION PRIZM CONTINU

Nom du patient:

Prép.	Nom	Dose préparée dans la K7	Conditionnement	Posologie prescrite (par 24h et par heures)
A				
B				
C				
D				

(Signer la remarque)

Remarques:

Verrou (LL0/LL1/LL2):

	Date	[J/M]									
@: changement de pile	Changement de K7	[h]									
	Prép.										
Indiquer le volume de la K7 pleine	Volume résiduel	[ml]									
Indiquer le débit désiré	Débit continu	[ml/h]									
Remettre à zéro	Millilitres reçus Depuis (date/heure)	[ml]									
(Consultation)	Détecteur air oblig.										

Remarques:

- Pour passer aux différentes fonctions, appuyer sur SUIVANT, confirmer la nouvelle valeur par ENTER.
- La pompe s'arrête automatiquement si elle détecte de l'air, si elle capte une occlusion en aval (affichage: "haute occlusion" - Alarme- Arrêt de la perfusion).
- Voyant lumineux: vert (= pompe fonctionne), orange (= pompe à l'arrêt ou état d'alarme), vert+ orange (= perfusion continue avec état d'alarme).