

FEUILLE DE PROGRAMMATION ET DE SUIVI PRIZM INTERMITTENT

Nom du patient:

No :

Prép.	Nom	Dose préparée dans la K7	Conditionnement	Posologie prescrite (par 24h et par heures)
A				
B				
C				
D				

(Signer la remarque)

Remarques:

Verrou (LL0/LL1/LL2):

	Date	[J/M]								
Ⓟ: changement de pile	Changement de K7	[h]								
	Prép.									
Indiquer le volume de la K7/flex pleine	Volume résiduel	[ml]								
Indiquer le nombre de ml par dose	Volume de dose	[ml]								
Indiquer la durée de perfusion par dose	Durée de dose	[min]								
Indiquer le temps entre les débuts de chaque dose	Cycle de dose	[hrs]								
Indiquer le débit du KVO	Débit KVO	ml/h								
Indiquer le début de la première dose	Heure début dose suivante IMMEDIAT									
(Consultation)	Débit de dose <consult. Uniquement>									
Remettre à zéro	Millilitres reçus	[ml]								
(Consultation)	Détecteur air oblig.									

Remarques:

⚠ Ne jamais arrêter la pompe lorsqu'une dose est en perfusion, mais uniquement lorsqu'elle est en KVO !

Pour passer aux différentes fonctions, appuyer sur SUIVANT, confirmer la nouvelle valeur par ENTRER

- La pompe s'arrête automatiquement si elle détecte de l'air, si elle capte une occlusion en aval (affichage: "haute pression" - Alarme- Arrêt de la perfusion).
- Voyant lumineux: vert (= pompe fonctionne), orange (= pompe à l'arrêt ou état d'alarme),
- vert+ orange (= perfusion continue avec état d'alarme).