

FEUILLE DE PROGRAMMATION ET DE SUIVI PRIZM PCA

Nom du patient:.....

Prép.	Nom	Dose préparée dans la K7	Conditionnement	Posologie prescrite (par 24h et par heures)
A				
B				
C				
D				

(Signer la remarque)

Remarques:.....

Verrou (LL0/LL1/LL2):

	Date	[J/M]								
Ⓟ: changement de pile	Changement de K7	[h]								
	Prép.									
Indiquer le volume de la K7 pleine	Volume résiduel	[ml]								
Indiquer les unités	Unité mg/ml	Mg ou ml								
Indiquer la concentration en mg/ml (n'apparaît par si unité en ml)	Concentration	Mg/ml								
Indiquer la dose de base	Débit continu	Mg/h ou ml/h								
Indiquer la dose de bolus	Dose sur demande	Mg ou ml								
Indiquer l'intervalle entre deux bolus possibles	Verr. Dose sur demande	H-min								
Indiquer le nombre de bolus possibles par heure (n'apparaît pas si intervalle: 1h!)	Dose max par heure									
Remettre à zéro	Compteur de dose Reçu/tenta. Depuis (date/heure)									
Remettre à zéro	Milligrammes reçus Depuis (date/heure)									
(Consultation)	Détecteur air oblig.									

Remarques:

- Pour passer aux différentes fonctions, appuyer sur SUIVANT, confirmer la nouvelle valeur par ENTER.
- La pompe s'arrête automatiquement si elle détecte de l'air, si elle capte une occlusion en aval (affichage: "haute occlusion" - Alarme- Arrêt de la perfusion).
- Voyant lumineux: vert (= pompe fonctionne), orange (= pompe à l'arrêt ou état d'alarme), vert+ orange (= perfusion continue avec état d'alarme).