36 av. Cardinal-Mermillod 1227 CAROUGE Tél. 022 420 64 80 Fax 022 420 64 81 contact@proximos.ch version mai 2011/1 www.proximos.ch

No page	:

FEUILLE DE PROGRAMMATION ET DE SUIVI PRIZM TPN

Nom du patient:						No :	No :				
Prép.	Préparation								Posologie prescrite (par 24h et par heures)		
Α											
В											
С											
(Signer la re	marque)										
Remarqı	ues:										
 Verrou (2):							.	
Date Année:	E	de	[Res vol]	[Infusion]	[Infusion Period]	[Taper ↑ Period]	[Taper ↓ Period]		[ml given]	Validation	
	PILE	no a	[ml]	[ml]	[HR : MIN]	[HR : MIN]	[HR : MIN]	[Ml/HR]	[ml]	>	
[J/M/h]	CHANGEMENT DE [h]	Changement de poche ou de préparation [h]	Volume tot de la poche, indique automatiquement le volume restant.	Volume à perfuser	Temps de perfusion total.	Durée de l'aug. progressive du débit, jusqu'au débit max.	Durée de dégression progressive du débit, jusqu'au débit min. (KVO 5ml/h).	Débit (RATE) plateau et KVO 5ml/h	Volume déjà perfusé		
	СНА	Chang	INDIQUER LE VOLUME DE LA POCHE PLEINE (*)	Indiquer le Volume de PERF. DESIRE	Indiquer	TOUJOURS METTRE ZERO	TOUJOURS METTRE ZERO	CALCULE PAR LA POMPE = VERIFICATIF	REMETTRE A ZERO (TOUCHE SET/CLEAR) LORS DE CHAQUE CHANGEMENT		
						0	0				
						0	0				
						0	0				
						0	0				
						0	0				
						0	0				
						0	0				
						0	0				
						0	0				
						0	0				
						0	0				
						0	0				
						0	0				

(*) Attention : Le volume de la poche pleine doit être d'au moins 10 ml supérieur au volume à perfuser, pour permettre le KVO à la fin de la perfusion.

Pour passer aux différentes fonctions, appuyer sur SUIVANT, confirmer la nouvelle valeur par ENTER. Lors d'une alarme air ou occlusion, la pompe s'arrête automatiquement.

<u>Voyant lumineux</u>: vert (= pompe fonctionne), orange (= pompe à l'arrêt ou état d'alarme), vert+orange (=perf continue avec état d'alarme).