

Injectomat Agilia Mini Guide



Nous recommandons la lecture complète de la Notice d'Utilisation avant utilisation.

En raison de l'évolution des normes, des textes réglementaires et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation de nos services.

Ce document ne peut être reproduit en partie ou en totalité sans l'autorisation écrite de Fresenius Kabi.

Injectomat, Volumat, Agilia et Vigilant sont des marques déposées dans certains pays par Fresenius Kabi.

 **FRESENIUS
KABI**
caring for life**

* Dispositifs médicaux
** Prendre soin de la vie

Fabricant :
Fresenius Vial S. A. S.
Le Grand Chemin
38590 Brézins - France
Tel.: +33 (0)4 76 67 10 10
Fax: +33 (0)4 76 67 11 34
Une société de Fresenius Kabi
www.fresenius-kabi.com

 **FRESENIUS
KABI**
caring for life**

* Dispositifs médicaux
** Prendre soin de la vie


Fonctionnement

1 Mise en fonctionnement



- Vérifier que l'Injectomat Agilia n'est pas endommagé.
- Raccorder l'appareil à une alimentation secteur : le témoin présence secteur s'allume.
- Appuyer sur <ON> pour la mise en fonctionnement de l'appareil. Les témoins d'alarmes et l'écran s'allument.
- Lors d'une première utilisation, lire le guide d'utilisation complet de l'appareil.

2 Sélection seringue

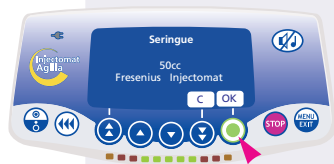

- La seringue installée doit correspondre à la seringue affichée.
- OK: validation de la seringue, ou,
- C: changement du choix de seringue puis validation de la seringue.

3 Purge



- Connecter le prolongateur à la seringue.
- Vérifier que le patient est déconnecté.
- Appuyer 2 fois sur <PURGE> pour démarrer la purge. (1 appui court + 1 appui long).
- Arrêt de la purge : relâcher la touche <PURGE>.
- Connecter le patient.

4 Sélection débit / démarrage



- Sélectionner le débit.
- Vérifier les paramètres de perfusion (seringue, débit...)
- Start: appuyer sur <VALIDATION> pour démarrer la perfusion.

5 Bolus



- Appuyer 2 fois sur <BOLUS> pour démarrer le bolus (1 appui court + 1 appui long).
- Arrêt du bolus : relâcher la touche.

Sélection d'un débit de bolus

- Appuyer sur <BOLUS> jusqu'à ce que le débit clignote.
- Sélectionner le débit (ml/h) et valider.

6 Pause



- Appuyer sur <STOP> : la perfusion s'arrête.
- Redémarrer la perfusion en appuyant <VALIDATION>.
- Programmation de la pause : appuyer 2 fois sur <STOP>. Sélectionner le temps de pause. La pause peut aussi être programmée à partir du menu.
- Lorsque le temps de pause est achevé, appuyer sur <VALIDATION> pour redémarrer la perfusion.

7 Silence Alarme



- Appuyer sur <SILENCE ALARME> pour supprimer le signal sonore.

Silence préventif : pour changer une seringue sans activation de l'alarme sonore, arrêter la perfusion par un appui sur <STOP>. Appuyer sur <SILENCE ALARME> et procéder au changement de la seringue.

8 Accès au menu



Appuyer sur <MENU/EXIT> pour accéder aux fonctions :

- Volume perfusé, Réglage pression, Autonomie batterie, Pause, verrouillage clavier...

Autres fonctions disponibles : consulter le guide d'utilisation complet de l'appareil.